

TOUS NOS APPAREILS SONT DISPONIBLES EN SILICONE SOUPLE

● ● ● ● OU SEMI-RIGIDE ● EN SILICONE BIOCOMPATIBLE

	AVEC APPAREILLAGES FIXES	CL II	CL I	CL III	
AGE 3					AGE 3
4		U Kiddy			4
5					5
6		U Start		U Class3 SMALL	6
7					7
8	U Brace SMALL	U Trainer S			8
9					9
10		U Class2 PRE or U Class2			10
11				U Class3	11
12	U Brace		U Trainer+ NEW		12
13					13
14			U Pilot Tailles 1 à 7		14

Gabarit de sélection de taille Concept **U Pilot**



Gagnez la confiance de vos patients dès le premier contact, optimisez l'efficacité de vos traitements orthodontiques, offrez de beaux sourires et faites le bonheur de vos patients.



SD-PR-001-06FR ver01
2026.07.28

Santé & Sourire
C'est plus facile que vous ne le pensez



RESPIRATION



DÉGLUTITION




MASTICATION



POSTURE



DÉVELOPPEMENT
FACIAL
ÉQUILIBRÉ

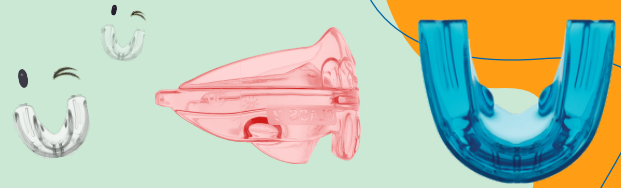

QU'EST-CE QU'UN TRAINER?

Un appareil orthopédique est un dispositif de traitement fonctionnel qui influence le développement des mâchoires en rééquilibrant la fonction des muscles péri-buccaux, la position et la fonction de la langue, ainsi que par une respiration nasale privilégiée. Il peut être utilisé dès l'âge de trois à quatre ans, ce qui permet le développement d'une fonction musculaire et respiratoire correcte pendant la croissance. Chez l'enfant comme chez l'adulte, il permet de relâcher les tensions musculaires. Il aide à corriger les mauvaises habitudes déjà acquises, telles que : la respiration buccale, la déglutition infantile, une tension excessive des lèvres, une position basse de la langue, le fait de se mordre la lèvre inférieure, une musculature labiale faible, certains troubles de la phonation, etc.


L'utilisation d'un matériau en silicone souple facilite grandement l'adaptation à l'appareil. La large gamme d'appareils orthodontiques couvre l'ensemble des anomalies à traiter. Si le patient ressent une gêne, l'appareil peut être facilement adapté à la taille de l'enfant.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL

L'appareil est fabriqué en silicone stérilisable, biocompatible et inodore, d'une dureté Shore de 30 ou 50. Le protocole recommandé consiste à commencer le traitement avec un appareil d'une dureté Shore de 30, puis à passer à un appareil de dureté Shore 50 si nécessaire (en cas de détériorations fréquentes dues à la mastication).



LES COMPOSANTS DE L'APPAREIL:

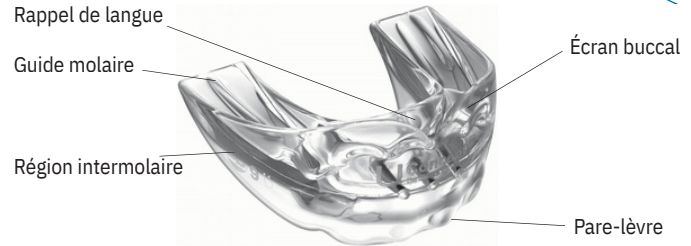

AVANTAGES de l'U Concept Trainer

- Traitement précoce dès l'âge de 3 ans – début du traitement alors que les dents de lait sont encore en place
- À utiliser en prétraitement pour les cas complexes
- Contribue à une respiration, une déglutition, une mastication et une posture saines
- Confort d'utilisation grâce à sa fabrication en silicone souple
- Traitement indolore
- Durée de séance réduite
- Divers guides d'exercices destinés aux patients

BROCHURES U Concept Trainer

